





Návod k použití k produktu

JEDNORÁZOVÉ FILTROVÁNÍ OBLIČEJ FFP2 NR IC1001 Typ - ART.
AMET2015 -



Č.výrobku VEN s.r.o./101159

Postupujte podle obrázků na přiloženém návodu k balení filtrační polomasky:

			
Nosní stahovací spona musí směřovat nahoru, ušní smyčky uchopte každou rukou	Nasadte masku: nejprve dáte bradu a elastické pásky si umístíte za uši	Prsty zatlačte do nosní spony, aby se maska upevnila	Zkontrolujte, zda maska zakrývá nos a ústa: Vzduch nesmí při výdechu procházet kolem nosní spony či jinudy

Respirátory značené KN95 jsou respirátory stejné třídy jako FFP2. Celková účinnost filtrace: $\geq 95\%$ Tento výrobek neposkytuje ochranu proti plynům nebo při nedostatku kyslíku v ovzduší! Užívat respirátor lze pouze v dobře větraných prostorách s dostatečným obsahem kyslíku v ovzduší (>19 obj. %). Respirátor nelze použít v případě, kdy koncentrace nebezpečných nebo toxických látek je neznámá nebo životu nebezpečná. Respirátor musí být vyměněn, jestliže je poškozen, zdeformován nebo dýchací odpor překročí pohodovou úroveň. Opusťte pracovní oblast ihned, jestliže se u vás vyskytnou nějaké potíže v dýchání, závrať nebo zpozorujete jiné významné nepohodlí. Respirátor uchovávejte na suchém a chladném (ne mrazivém) místě. Použitý respirátor likvidujte v souladu s místními předpisy. Použití respirátoru ve výbušném prostředí není dovoleno. Vousy nebo vlasy zasahující do těsnící linie respirátoru mohou mít významný vliv na netěsnost respirátoru.

Dodavatel pro ČR: VEN s.r.o., V Růžovém údolí 555, 278 01 Kralupy n/Vlt. info@ven-sro.cz

Dovozca pre SR: VEN SK s.r.o., Pezinská cesta 30, 902301 Senec, obchod@ven.sk

Výrobce: SCAVV S.r.l., Via Pian di Botine 15, 06019 Umbertide (PG), Italy, info@scavvsrl.com